

Argotone® 0-12

Nebulizzatore fluidificante decongestionante

ARGOTONE® 0-12 è un dispositivo medico che favorisce la fluidificazione e la detersione delle secrezioni nasali migliorando la respirazione e la ventilazione tubarica.

Indicazioni

Trattamento delle sintomatologie associate agli stati infiammatori da raffreddamento anche di origine batterica delle cavità nasali.

Favorisce la fluidificazione e la detersione delle secrezioni nasali migliorando pertanto la respirazione e la ventilazione tubarica.

Modo d'uso

Per preparare il flacone, togliere il cappuccio dalla pompetta nebulizzatrice e senza posarla su alcuna superficie onde evitare contaminazione, inserirla nel flacone.

Effettuare 1-2 nebulizzazioni 2-3 volte al giorno fino ad un massimo di 7 giorni.

Il prodotto può essere utilizzato anche in presenza di piccole lesioni della cute intorno alla narici o della mucosa nasale.

Effetti indesiderati

Non sono conosciuti effetti indesiderati.

Avvertenze:

Non utilizzare in caso di ipersensibilità nota verso i componenti del prodotto.

In caso di reazioni avverse sospendere l'uso del prodotto e consultare il medico.

Richiudere bene il contenitore dopo l'uso.

Non utilizzare il prodotto dopo la data di scadenza indicata sulla confezione. Non utilizzare il prodotto se la confezione o il flacone non si presentano integri.

Tenere lontano da fonti di calore e dalla portata dei bambini. Evitare il contatto con gli occhi.

Non iniettare.
Non ingerire.
Non disperdere il flacone nell'ambiente dopo l'uso.
Conservare a temperatura non superiore a 30°C.
Non utilizzare il prodotto dopo 90 giorni dall'apertura.
Evitare l'uso promiscuo del prodotto.

Composizione

Carbossimetil-betaglucano, argento colloidale, potassio sorbato, acido sorbico, sodio benzoato, N-idrossimetilglicinato sodico, aroma fragola, sodio fosfato monobasico, sodio fosfato bibasico, acqua depurata.

Senza glutine, senza lattosio

Confezione

Flacone da 20 ml con nebulizzatore



Dompé farmaceutici S.p.A.

Via San Martino, 12 - 20122 Milano

Data ultima revisione del testo: settembre 2020



Dompé
per l'ambiente



INDICAZIONI PER LO SMALTIMENTO DOPO L'USO		
RACCOLTA DIFFERENZIATA		
Astuccio PAP21	Foglietto illustrativo PAP22	Flacone PET
CARTA	CARTA	PLASTICA
Verifica le disposizioni del tuo comune.		